




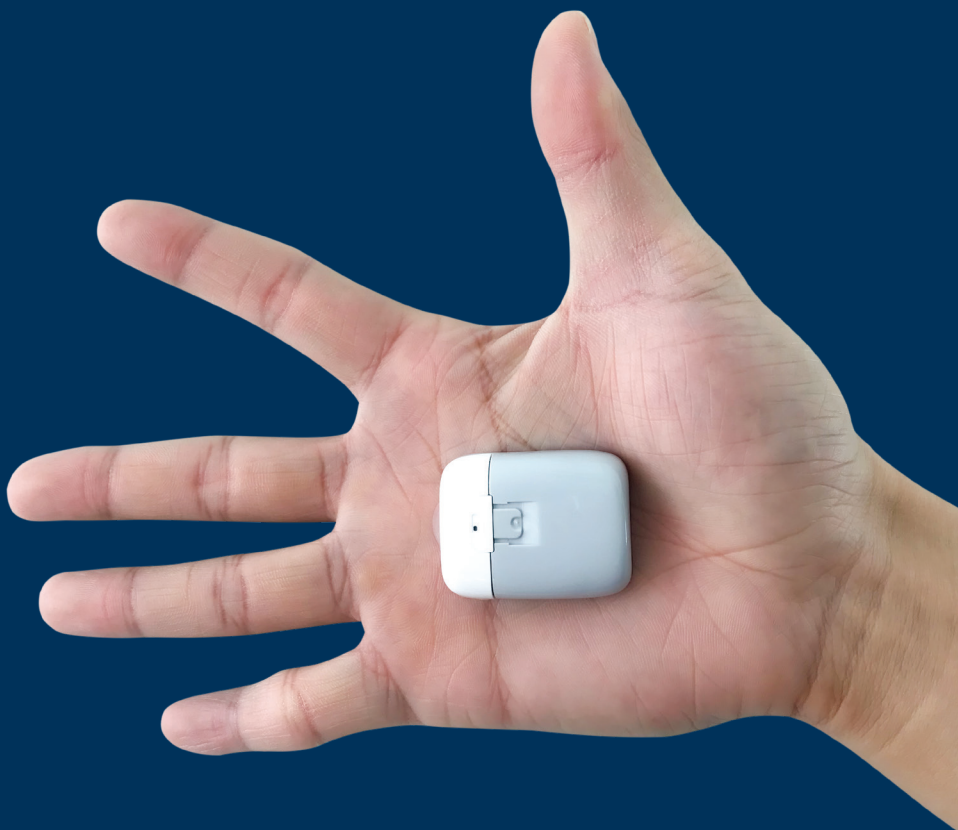

Σύντομος Οδηγός Medtrum EasyPatch App

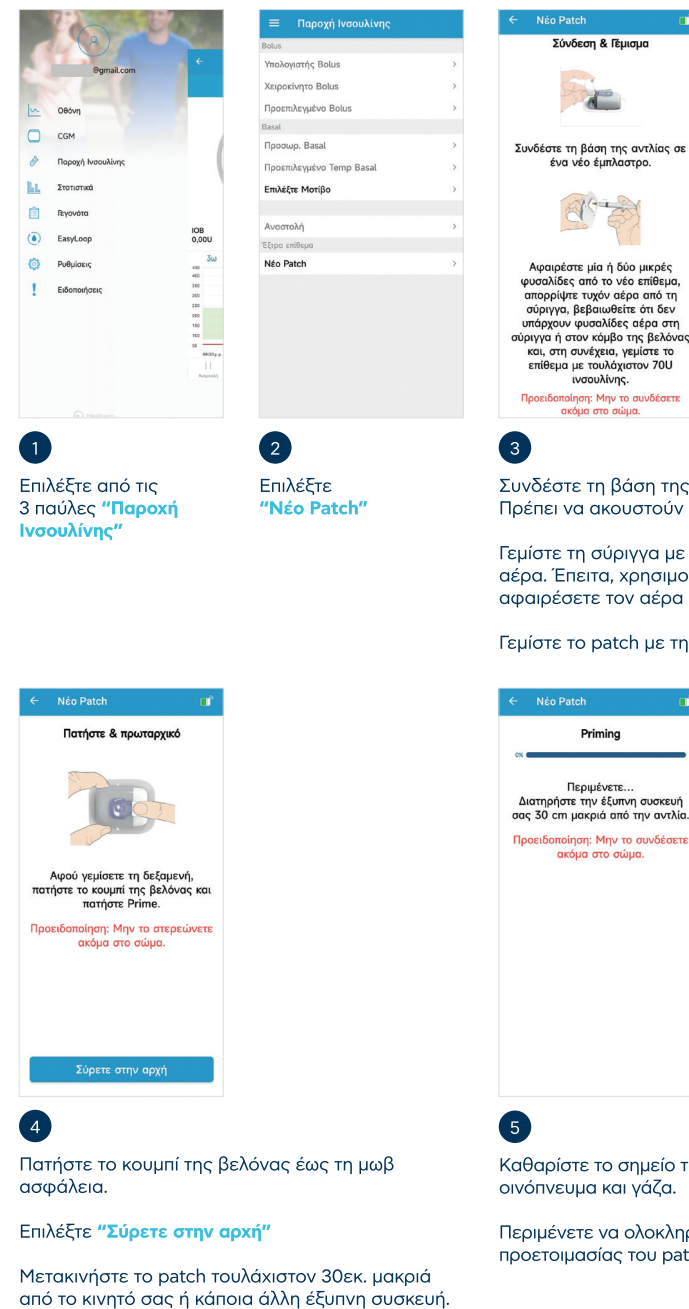

Πώς να τοποθετήσετε ένα νέο patch (συνέχεια)

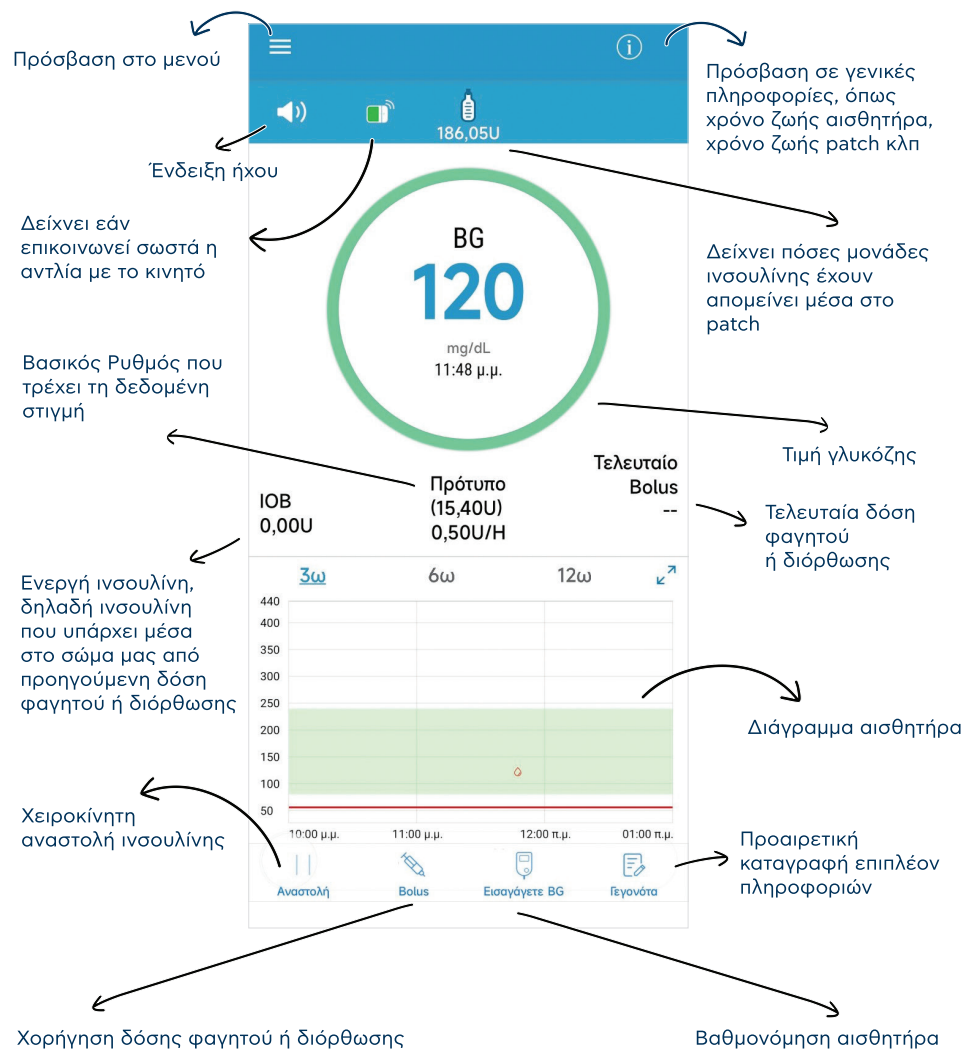

6

Αφαιρέστε τη μωβ ασφάλεια σύροντας προς τα έξω. Αφαιρέστε τα δύο αυτοκόλλητα, ξεκινώντας από αυτό που έχει το λευκό πλαστικό. Εφαρμόστε την αντλία στο σημείο που καθαρίσατε, πιέζοντας στο κέντρο για 5 δευτερόλεπτα. Αφήστε χαλαρό το patch επάνω στο δέρμα και κολλήστε το υπόλοιπο αυτοκόλλητο. Πατήστε το κουμπί του καθετήρα. Επιλέξτε **συνέχεια**



7

Ενεργοποίηση basal.

Πώς να χορηγήσετε μια bolus δόση (φαγητό ή διόρθωση)



1


Από την αρχική οθόνη επιλέξτε **"Bolus"**

2

Εισάγετε την τιμή του σακχάρου και τα γραμμάρια υδατανθράκων (εφόσον υπάρχει γεύμα).


Επιλέξτε **"Επόμενο"**

Πώς να απενεργοποιήσετε ένα patch και να κάνετε αλλαγή

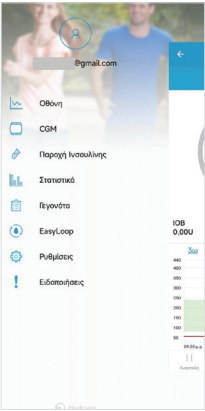


1

Επιλέξτε από τις 3 παύλες **"Παροχή Ινσουλίνης"**

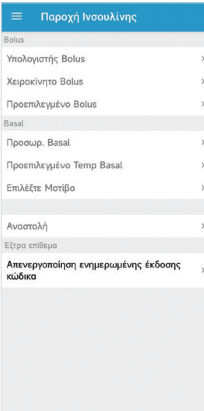

2

Επιλέξτε **"Απενεργοποίηση ενημερωμένης έκδοσης κώδικα"**

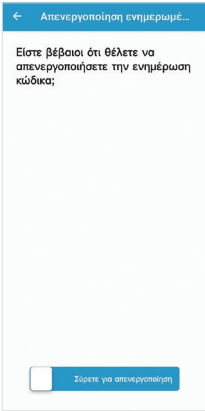

3

Επιλέξτε **"Σύρετε για απενεργοποίηση"**

Ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία τοποθέτησης νέου patch από την αρχή.

3


Αφού ελέγξετε την προτεινόμενη δόση, επιλέξτε **"Ολοκλήρωση"**

4

Επιλέξτε **"Σύρετε για παραγωγή"**


5

Επιλέξτε **"Επιστροφή"**

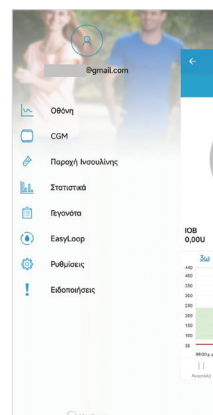


1

Επιλέξτε από τις 3 παύλες **"Παροχή Ινσουλίνης"**

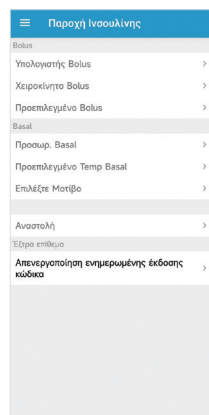


2

Επιλέξτε **"Προσωρινό Basal"** ή **"Temp Basal"**

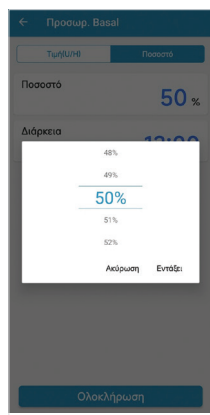


3

Επιλέξτε την αλλαγή σε % που χρειάζεται να κάνετε.

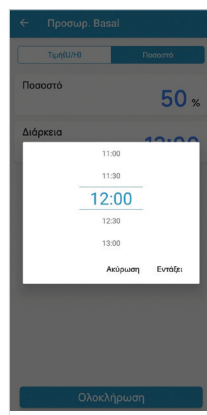

4

Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια.

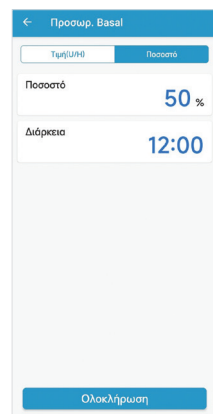


5

Επιβεβαιώστε τις τιμές που έχετε εισάγει και επιλέξτε **"Ολοκλήρωση"**



6

Επιλέξτε **"Σύρετε για να ξεκινήσετε το temp basal"**

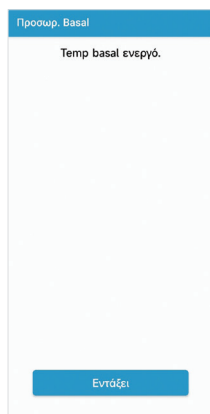

7


Επιλέξτε **"Εντάξει"**

ΑΝΑΣΤΟΛΗ




1

Επιλέξτε **"Αναστολή"**

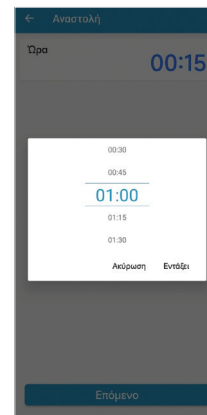


2

Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της αναστολής.

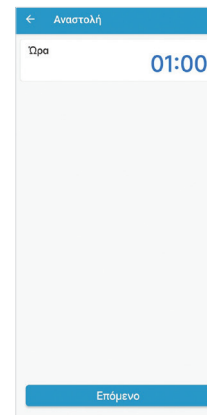

3

Επιλέξτε **"Επόμενο"**

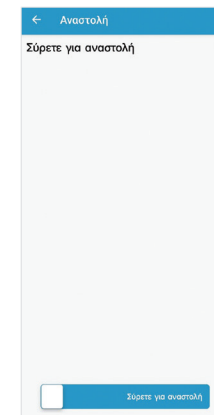

4


Επιλέξτε **"Σύρετε για αναστολή"**

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ




1

Επιλέξτε **"Επανάληψη"**

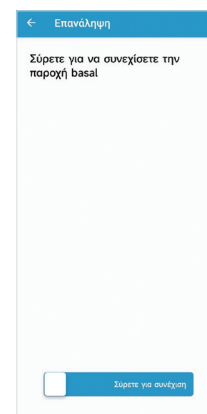

2

Επιλέξτε **"Σύρετε για συνέχιση"**

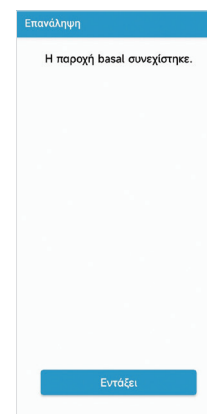

3

Επιλέξτε **"Εντάξει"**



ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

Για όλους εμάς στην Eifron, ο άνθρωπος είναι στην καρδιά του ενδιαφέροντός μας! Παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση για τα προϊόντα μας, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η ομάδα μας παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/7, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλότερη μετάβαση σε κάθε σύστημα.

Σημαντικά Τηλέφωνα για Χρήστες των Συστημάτων Medtrum

(Για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη)

Τεχνική Υποστήριξη (24/7)

Κλήση από κινητό
ή σταθερό:
694 999 1111

Εξυπηρέτηση Πελατών

(Άυλα Barcode & Αποστολές
Αναλωσίμων)
Δευτέρα – Παρασκευή
08:00 – 16:00
2310 464 000

Φροντίδα Ασθενών Medtrum

(Αντικαταστάσεις – Επιστροφές
Προϊόντων)
Δευτέρα – Παρασκευή
09:00 – 17:00
2310 461 000 (εσ. 5)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη

Λεωφόρος Πολυγύρου 32, Θέρμη
2310 461 000
2310 464 000

Αθήνα

Ακακίων 52,
Εμπορικό Κέντρο Πολύδροσο

info@eifron.com

www.eifron.com

eifron caringforyou eifron4888 Eifron